

РеалБест Экстракция 1000



+ 30 мкл ВКО




+1 мл образца (500 мкл)*
ОКО: 1 мл ОКО
ПКО: 970 мкл ОКО + 30 мкл ПКО



+ 1 мл концентрирующего раствора (500 мкл)*
Встряхнуть на вортексе
Инкубировать 10-15 минут, 18-26°C
Центрифугировать 5 минут 3 тыс. об/мин
Отобрать супернатант



+ 200 мкл лизирующего раствора №1
Встряхнуть на вортексе
Инкубировать 5 минут, 18-26°C

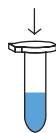

+ 500 мкл лизирующего раствора №2 (с сорбентом)
Встряхнуть на вортексе
Инкубировать 5 минут, 18-26°C
Термошейкер: 10 минут, 56°C, 1300 об/мин



+ 750 мкл осадителя НК
Встряхнуть на вортексе
Инкубировать 3-5 минут, 18-26°C
Центрифугировать 5 минут 13 тыс. об/мин
Отобрать супернатант



+ 500 мкл раствора для отмывки №1
Встряхнуть на вортексе
Центрифугировать 5 минут 13 тыс. об/мин
Отобрать супернатант



+ 300 мкл раствора для отмывки №2
Встряхнуть на вортексе
Центрифугировать 5 минут 13 тыс. об/мин
Отобрать супернатант
Высушить 2-3 минуты, 18-26°C



+ 200 мкл элюирующего раствора
Встряхнуть на вортексе
Термошейкер: 10 минут, 56°C, 1300 об/мин
Центрифугировать 1 минуту 13 тыс. об/мин

*Допускается выделение НК из 0,5 мл сыворотки (плазмы) крови